

FM-Empfänger und Induktionsschleife – Bedienungsanleitung

1. Voraussetzung für die Nutzung: Der/die Lehrende muss ein Mikrofon benutzen. Der FM-Empfänger muss auf die richtige Frequenz eingestellt werden. Jeder Hörsaal hat eine andere Frequenz. Diese Frequenz können Sie bei dem/der Lehrenden erfragen. Die Frequenz steht nämlich im Display seines/ihrer Mikrofons. Am besten die Frequenz und den Hörsaal notieren für das nächste Mal, denn die Frequenz ist jedem Hörsaal dauerhaft zugeordnet.
2. Klappe des FM-Empfängers öffnen und Akkus einsetzen.
3. Am Drehknopf oben auf dem FM-Empfänger das Gerät einschalten. An diesem Knopf kann auch die Lautstärke eingestellt werden.
4. Den Button **Set** 1 Mal drücken. Mit einer der Pfeiltasten durchklicken bis **Advanced** erscheint. Danach **Set** drücken. Es erscheint im Display **Tune**. Wieder **Set** drücken.
5. Nun mit den Pfeiltasten die Frequenz einstellen, die zum jeweiligen Hörsaal gehört (siehe Punkt 1.). Leider ist es nicht möglich, diese einzugeben. Daher müssen Sie so lange mit den Pfeiltasten hoch oder runter blättern, bis die richtige Frequenz im Display erscheint. Dann **Store** drücken.
Hinweis hierzu: Die Frequenz eines Hörsaals lässt sich nicht dauerhaft speichern. Wenn Sie also den FM-Empfänger in mehreren unterschiedlichen Hörsälen benutzen, muss die Frequenz jedes Mal neu eingegeben werden.
6. Induktionsschleife in das Gerät einstecken.

Ihr Hörgerät muss auf Induktionsschleife eingestellt werden.